

# ÜBERSICHT – ANZUGSMOMENTE

Artikel	Instrument	Anzugsmoment
 CONELOG® Implantat-Verschlusschraube		
 CONELOG® Gingivaformer zylindrisch, wide body bottleneck		
 CONELOG® Abformpfosten CONELOG® Bissregistrierpfosten		
 CONELOG® Laborschrauben		
 CONELOG® Laborschrauben mit reduziertem Kopf		
 CONELOG® Provisorisches Abutment, Titanlegierung, Krone und Brücke		
 CONELOG® Abutmentschrauben		
 CONELOG® Abutmentschrauben mit reduziertem Kopf	 J5317.0510  J5317.0501  J5317.0502  J5317.0504  J5317.0503	handfest**
 CONELOG® Esthomic® Abutment, gerade		
 CONELOG® Esthomic® Abutment, abgewinkelt 15°/20°		
 CONELOG® Esthomic® Abutment, Inset		
 Kunststoff-Abutment		
 CONELOG® Universal-Abutment		
 CONELOG® Teleskop-Abutment		
 CONELOG® Logfit® Abutments		
 CONELOG® Titanbasen CAD/CAM, Krone und Brücke		
		20 Ncm*

\* mit der Drehmomentratsche J5320.1030

\*\* Optional für provisorische Abutments Titan: Anzugsmoment nach erfolgter Einheilphase 20 Ncm.

Alle Schrauben müssen nach mindestens 5 Minuten mit dem entsprechenden Drehmoment nachgezogen werden!

Ø 3.3 mm Ø 3.8 mm Ø 4.3 mm Ø 5.0 mm 3.3 3.8 4.3 5.0

Artikel	Instrument	Anzugsmoment
 CONELOG® Stegaufbauten, gerade	 J5300.0020  J5300.0025	20 Ncm* 30 Ncm*
 CONELOG® Stegaufbauten, 17° und 30° abgewinkelt		20 Ncm*
 Scankappe für Stegaufbau		handfest
 Titankappen für Stegaufbau, Krone/Brücke		
 Kronenbasis für Stegaufbau, ausbrennbar	 J5317.0510  J5317.0501  J5317.0502  J5317.0504  J5317.0503	15 Ncm*
 Stegbasen für Stegaufbau, ausbrennbar, angießbar, anlötbar, anlaserbar		
 Titanklebebasis für Stegaufbau, Passive-Fit		
 Heilkappe für Stegaufbau	 J5300.0027  J5300.0028	handfest
 Abformkappe für Stegaufbau, geschlossener Löffel (Brücke/Steg)		
 CONELOG® Kugelaufbauten	 J5300.0011	20 Ncm* 30 Ncm*
 CONELOG® Locator® Aufbauten	 J2253.0001	20 Ncm* 30 Ncm*
 CONELOG® Scankörper	 J5317.0501  J5317.0502	handfest
 CONELOG® Scanpfosten für Sirona Scanbody		

\* mit der Drehmomentratsche J5320.1030

Alle Schrauben müssen nach mindestens 5 Minuten mit dem entsprechenden Drehmoment nachgezogen werden!